



子宮內膜抽吸器 (滅菌)

Endometrial Suction Curette (Sterile)

使用前請閱讀說明



產品用途

子宮內膜抽吸器是一種主要用於子宮內膜活檢的醫療器械，這是一種從子宮內膜收集組織樣本的程式。它有 3.6 毫米和 3.0 毫米的外徑可供選擇，僅供單個患者使用。

該手術通常用於：

01. 診斷異常子宮出血，如荷爾蒙失調、息肉或癌症
02. 評估子宮內膜的健康情況並識別潛在的生育問題
03. 幫助監測激素替代療法和其他治療的有效性

規格

料號	長度 (mm)	直徑 (mm)	顏色	特徵
ESC30A1	265	3.0	透明	可彎曲 3.0
ESC36A1	265	3.6	透明	標準硬挺 3.6

包裝

料號	尺寸 (mm)			數量			重量 / 外箱 (kg)	
	小袋	內盒	外箱	數量 / 內盒	內盒 / 外箱	總數量 / 外箱	淨重	毛重
ESC30A1	60 x 330 x 5	75 x 50 x 331	369 x 352 x 411	25	35	875	1.24	5.83
ESC36A1	60 x 330 x 5	75 x 50 x 331	369 x 352 x 411	25	35	875	1.70	6.28

使用說明

01. 插入陰道窺器，露出宮頸
02. 用消毒液清潔子宮頸
03. 輕輕地將抽吸器插入宮頸管和子宮腔
04. 啟動抽吸機構，將子宮內膜組織吸入刮匙
05. 旋轉抽吸器以確保足夠的組織採樣
06. 慢慢抽出抽吸器，保持輕柔的吸力
07. 目視檢查採集的組織樣本
08. 將樣本送至化驗室進行病理檢查

注意事項

01. 該程序應由訓練有素的醫療保健專業人員進行，以盡量減少不適和併發症。
02. 使用局部麻醉有助於減少手術過程中的不適。
03. 雖然總體上是安全的，但手術存在潛在風險，例如出血、痙攣、和感染。
04. 患者在手術後可能會出現輕微的痙攣或點滴出血。遵循很重要術後護理說明，例如避免劇烈活動和使用衛生巾。
05. 將收集的組織樣本送至實驗室進行分析，以診斷任何潛在疾病。

重要的是要注意，雖然子宮內膜抽吸刮除術是一種微創手術，但必須諮詢醫療保健專業人員以確定它是否適合您的特定醫療需求。

FDA 510(k) K240434



笠翔醫材股份有限公司

新北市221012汐止區中興路43號2樓
Tel : (02) 8646-1999
Fax : (02) 2647-1999

經銷商

笠民實業有限公司
新北市汐止區南興路58號10樓
Tel : (02) 8642-1999
Fax : (02) 2647-1999