



子宮灌注操縱器(滅菌)

Uterine Manipulator / Injector (Sterile)
使用前請閱讀說明



產品用途

子宮灌注操縱器/注射器是婦科手術中使用的醫療設備，用於操縱子宮並促進將液體或藥物注入子宮腔。它們通常用於以下程式：

01. 宮腔鏡檢查：一種微創手術，允許醫生檢查子宮內部。
02. 宮腔內人工授精 (IUI)：一種將精子直接放入子宮的生育治療。
03. 子宮內膜活檢：從子宮內膜收集組織樣本的程式。

規格

料號	長度 (mm)	直徑 (mm)	顏色	特徵
CUMI50B2	350±0.3	5.0±0.2	透明管，藍柄	可調式(滑動)手把，附 11ml 螺旋式注射筒，灌注導管(支架)，具深度標示(1~10cm)，數字正確易讀。
CUMI50B1	350±0.3	5.0±0.2	透明管，藍柄	固定手把，附 11ml 螺旋式注射筒，灌注導管(支架)，具深度標示(1~10cm)，數字正確易讀。

包裝

尺寸 (mm)			數量			重量 / 外箱 (kg)	
小袋	內盒	外箱	數量 / 內盒	內盒 / 外箱	總數量 / 外箱	淨重	毛重
200 x 370 x 18	350 x 200 x 125	369 x 352 x 411	12	5	60	2.59	4.98

使用說明

01. 檢查無菌袋是否被打開或損壞。
02. 確保導管牢固地卡在手柄中。
03. 將 6~7cc 的空氣注入逆止閥以測試充氣氣球。
04. 測試後，排空氣球中的所有空氣以便插入。
05. 探查子宮的深度和方向，相應地調整操縱器深度，笠翔操縱器預設深度為 6 厘米。
06. 確定子宮頸是否需要擴張。如果通道不夠寬，充氣氣球可能會撕裂。
07. 潤滑導管頭部和氣球以便於插入。
08. 沿著子宮頸的自然軸線小心引導操縱器以避免受傷。
09. 將操縱器插入子宮，直到手柄頭部表面接觸到外部子宮頸。
10. 用 3~10cc 的空氣慢慢給氣球充氣，直到緊貼子宮頸不再拉起。拆下注射器時，須注意防止空氣回流到注射器中。
11. 輕輕拉動操縱器以確保氣球充氣充足。氣球過度充氣可能導致子宮輸卵管痙攣和通暢管的生理性閉合。
12. 為確保氣球在手術過程中沒有破裂，請檢查軟管的拉緊程度。軟管變軟表示氣球破裂或洩漏。
13. 要移除操縱器，請將注射器插入逆止閥並為氣球放氣，然後小心移除操縱器。

注意事項

01. 本產品為滅菌包裝，若包裝被打開或損壞已非無菌產品。
02. 嚴禁販賣此產品予醫師以外之人士。
03. 請勿重覆使用以避免微生物之感染。
04. 如果滅菌包裝在使用前損壞或無意打開，請勿使用。
05. 存放在可避光、涼爽、乾燥的地方。
06. 使用前請先測試充氣氣囊是否有洩漏情形。
07. 使用前請潤滑導管尖端。
08. 使用任何液體介質時，請務必遵守製造商的說明。
09. 放入腔體充氣後確保氣囊能適當充氣（擠壓充氣氣球並檢查其繃緊度）
10. 洩氣的氣囊可能造成對子宮的損傷和創傷，取出時請放慢速度。

警告

01. 在操作之前給氣球充氣是必須的，以免損傷子宮。
02. 適當的速度放入操縱器以避免子宮損傷。
03. 產品使用後請按醫療廢棄物規定妥善處理。
04. 如有以下情形請事先告知醫師，懷孕、疑似懷孕、子宮、輸卵管感染、基質過敏或與體外受精有關的輔助生殖技術執行過程中，由專業醫師判斷可否進行手術檢查活動。



笠翔醫材股份有限公司

新北市221012汐止區中興路43號2樓
Tel : (02) 8646-1999
Fax : (02) 2647-1999

衛部醫器製字第008232號

經銷商

笠民實業有限公司
新北市汐止區南興路58號10樓
Tel : (02) 8642-1999
Fax : (02) 2647-1999